

## Noritake

### TABLA DE COMBINACIÓN DE COLOR

COLORES	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>3.5</sub>	A <sub>4</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	NW <sub>0</sub>	NW <sub>0.5</sub>	NP <sub>1.5</sub>	NP <sub>2.5</sub>
Opaquer/ Base	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>3.5</sub>	A <sub>4</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	NW <sub>0</sub>	NW <sub>0.5</sub>	NP <sub>1.5</sub>	NP <sub>2.5</sub>
Hombros	MA <sub>1</sub>	MA <sub>2</sub>	MA <sub>3</sub>	MA <sub>3.5</sub>	MA <sub>4</sub>	MB <sub>1</sub> <sup>*1</sup>	MB <sub>2</sub>	MB <sub>3</sub>	MB <sub>4</sub>	MC <sub>1</sub> <sup>*1</sup>	MC <sub>2</sub>	MC <sub>3</sub> <sup>*1</sup>	MC <sub>4</sub>	MD <sub>2</sub> <sup>*1</sup>	MD <sub>3</sub>	MD <sub>4</sub>	MNW <sub>0</sub>	MNW <sub>0.5</sub>	MNP <sub>1.5</sub>	MNP <sub>2.5</sub>
Dentina Opaca	OBA <sub>1</sub>	OBA <sub>2</sub>	OBA <sub>3</sub>	OBA <sub>3.5</sub>	OBA <sub>4</sub>	OBB <sub>1</sub>	OBB <sub>2</sub>	OBB <sub>3</sub>	OBB <sub>4</sub>	OBC <sub>1</sub>	OBC <sub>2</sub>	OBC <sub>3</sub>	OBC <sub>4</sub>	OBD <sub>2</sub>	OBD <sub>3</sub>	OBD <sub>4</sub>	-	-	OBNP <sub>1.5</sub>	OBNP <sub>2.5</sub>
Dentina	A <sub>1</sub> B	A <sub>2</sub> B	A <sub>3</sub> B	A <sub>3.5</sub> B	A <sub>4</sub> B	B <sub>1</sub> B	B <sub>2</sub> B	B <sub>3</sub> B	B <sub>4</sub> B	C <sub>1</sub> B	C <sub>2</sub> B	C <sub>3</sub> B	C <sub>4</sub> B	D <sub>2</sub> B	D <sub>3</sub> B	D <sub>4</sub> B	NW <sub>0</sub> B	NW <sub>0.5</sub> B	NP <sub>1.5</sub> B	NP <sub>2.5</sub> B
Cervical	-	CV-1 <sup>*2</sup>	CV-1 <sup>*3</sup>	CV-1 <sup>*3</sup>	CV-1	-	CV-2 <sup>*2</sup>	CV-2 <sup>*3</sup>	CV-2	-	CV-3 <sup>*2</sup>	CV-3 <sup>*3</sup>	CV-3	CV-4 <sup>*2</sup>	CV-4 <sup>*3</sup>	CV-4	-	-	-	CV-1 <sup>*2</sup>
Esmalte /Incisal	E <sub>2</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>2</sub>

\*1 Para conseguir los colores B<sub>1</sub>, C<sub>1</sub>, C<sub>3</sub> y D<sub>2</sub> utilizar B<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>4</sub> y D<sub>3</sub> y polvo de dilución MDL en proporción 1:1

\*2 Mezclar la dentina y cervical en proporción 2:1

\*3 Mezclar la dentina y cervical en proporción 1:1

TRANSLÚCIDO	T <sub>x</sub>	T <sub>0</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	LUSTER/ OPALEScentes	LT <sub>0</sub>	LT <sub>1</sub>	TBlue	LT Natural	Creamy Enamel	Sun Bright	Incisal Aureola	Creamy White
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-------	---------------	------------------	---------------	--------------------	-----------------

Entre las porcelanas translúcidas, el grado de translucidez es el siguiente: T<sub>x</sub> > T<sub>0</sub> > T<sub>1</sub> > T<sub>2</sub>

HOMBROS	M Clear	M Orange	M Peach	MDL	MRP	DENTINA OPACA	OB White	OB Orange	OB Pale Pink	CORRECCIÓN	AD-T	AD-B
---------	---------	-------------	------------	-----	-----	---------------	----------	-----------	-----------------	------------	------	------

MRP: masa de corrección para hombros

MDL: polvo diluyente

MODIFICADORES/ INTENSIVOS	White	Gray	Blue	Yellow	Light Orange	Orange	Brown	Pink	Dark Pink	Coral Pink	Mamelon-1	Mamelon-2	Light Tissue	Dark Tissue
------------------------------	-------	------	------	--------	-----------------	--------	-------	------	--------------	---------------	-----------	-----------	-----------------	----------------