



La porcelana Addmate puede ser usada valiéndose de esta referencia de los siguientes colores:

OPAQUER	COLORES PROPICIOS
Light Opaquer	A1O, A2O, A3O, B2O
Dark Opaquer	A3, 5O, B3O, B4O

DENTINA	COLORES PROPICIOS
Light Body	A1B, A2B, A3B, B2B
Dark Body	A3, 5B, A4B, B3B, B4B

- E:** Todos los colores del esmalte  
**T:** Todos los colores del traslúcido  
**LT:** Los colores opalescentes del Luster

### El programa de cocción

- Tipo I\*** • Wash-bake del opaquer en el caso de que se salta una parte de la porcelana del metal.
- Tipo II\*** • La corrección después de la soldadura secundaria (grietas, burbujas de aire o estructuras).
- Tipo III\*** • Cuando no se quiere tener la superficie brillante después de la cocción (Cuando no se quiere tener el margen redondeado).
- La corrección de la zona marginal en porcelana. (uso N. 6) **\*PAGINA PRECEDENTE.**
- La corrección de la porcelana sin metal (uso N. 7) **\*PAGINA PRECEDENTE.**
- Tipo IV\*** • Cuando se hace el uso no comprendido en el I-III y cuando se desea la superficie brillante.

	Secado	Temp. Inicial	Velocidad Calent.	Temp. Cocción	Vacío	Eliminación del vacío	Mantenimiento
I	5 min.	450°C.	45°C.	700°C.	72cmHg	700°C.	1 min.
II	5 min.	450°C.	45°C.	660°C.	72cmHg	660°C.	1-2 min.
III	5 min.	450°C.	45°C.	680°C.	72cmHg	670°C.	0
IV	5 min.	450°C.	45°C.	700°C.	72cmHg	690°C.	0

La temperatura del programa puede variar ligeramente según el horno