
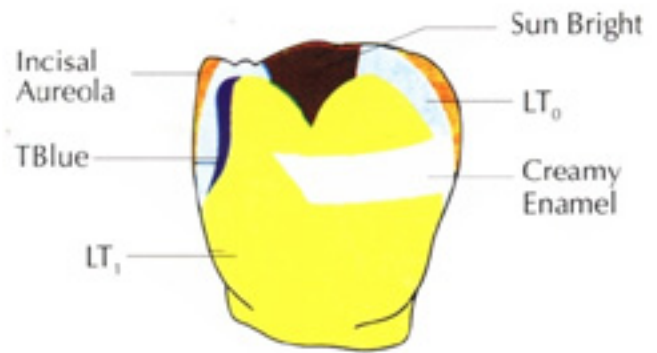



● APLICACIÓN DE LA PORCELANA LUSTER (1)

EN EL PACIENTE ANCIANO

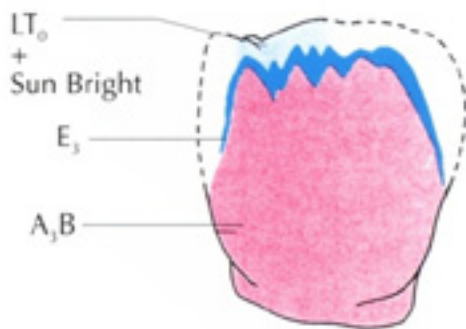

Construir la dentina y el esmalte preseleccionados de la misma manera como en el paciente joven, con la única excepción del hecho que la dentina es construida ligeramente más larga hacia el corte incisal. Aplicar LT₀ en la zona donde se quiera realizar el crack de rotura del esmalte usando el INTERNAL LIVE STAIN, así se mantiene una elevada transparencia en el corte incisal. Después de la primera cocción, colorear la rotura del esmalte con el INTERNAL LIVE STAIN.

Usando diferentes tonalidades de la porcelana Luster se pueden reproducir los colores más complejos.

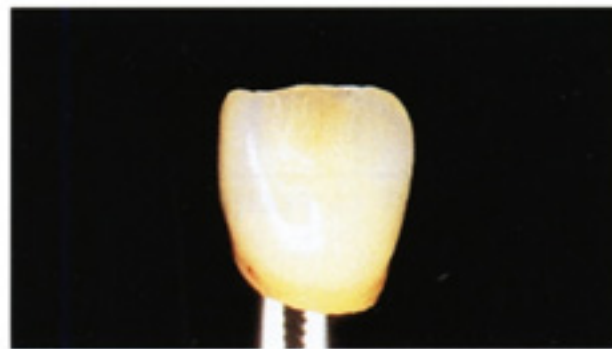

Estamos presentando la técnica aplicativa para pacientes jóvenes y ancianos con el uso de la Porcelana Luster y del Maquillaje Interno. Comúnmente el uso del Maquillaje Interno no es algo absolutamente imprescindible. Si no se utiliza Maquillaje Interno, no es necesaria la primera cocción de la dentina y del esmalte.

CASO CLÍNICO:



ANTES DE LA OPERACIÓN. Debe ser insertada la prótesis con corona cerámometálica 321-1234 como se ha descrito



Vista vestibular después del posicionamiento oral: se aprecia la masa aureola y Sun Bright



Después de posicionamiento en la cavidad oral: aspecto proximal, se notan los efectos Luster sobre la corona.