



● CUANDO SE USA LA PORCELANA LUSTER

Usar el mismo esquema de cocción de la Porcelana EX-3.

Para un diente con alta transparencia en el corte marginal, construir la cerámica dentina incisal de la manera acostumbrada, después de esta primera cocción aplicar el color mamelon y un blanco pálido del INTERNAL LIVE STAIN.

● APLICACIÓN DE LA PORCELANA LUSTER (1)

EN EL PACIENTE JOVEN

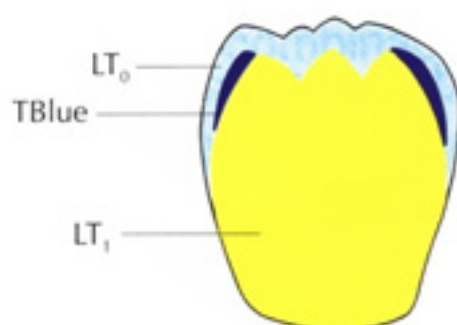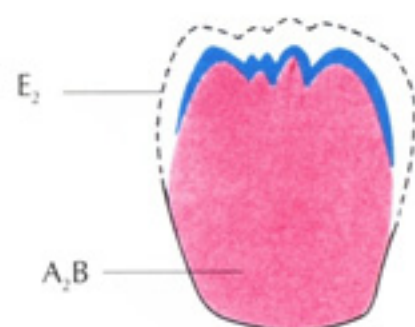

En el caso que se presente una alta transparencia de corte incisal. Construir la dentina y el esmalte en la manera habitual, como se ha indicado en el diagrama.

De cualquier modo el esmalte debe ser usado en cantidad inferior a la normal. (reducir el corte de la dentina).

Después de la primera cocción de la dentina y del esmalte, si es necesario reproducir el mamelón-color y un blanco pálido, usar el Internal.

El Tblue es aplicado en el ángulo del corte incisal para obtener una coloración del esmalte de azul más intenso.

LTO se aplica en el corte marginal para expresar una mayor transparencia. Resultado: el reflejo de la luz más intenso.



El color final, vivo y luminoso de corte incisal, reproduce de manera fiel la opalescencia similar al diente natural.