

● LUSTER PORCELAIN: INDICACIONES PARA EL COLOR

T BLUE (Translúcido Azul)

Para usar principalmente en el corte marginal del diente joven, para reproducir una pálida transparencia.

LTO (Luster To)

Para usar en el corte marginal y para manifestar un esmalte incisal muy transparente que deja entrever la dentina.

LT1 (Luster T1)

Particularmente eficaz para expresar la translucidez del esmalte del diente natural, puede ser usado de la misma forma que el EX-3 T1.

CREAMY ENAMEL

Para usar principalmente en las cúspides y crestas de molares, ocasionalmente en la región distal y proximal del diente frontal en la región adyacente al corte marginal.

SUN BRIGHT

Es usado como corte anaranjado del corte marginal ejecutado en el diente de mediana edad y ancianos. También para realizar una corona anaranjada oscura o ámbar similar al esmalte.

INCISAL AUREOLA

Es usado para producir un efecto aureola causado por la reflexión de la luz, de color diferente a la zona marginal extrema (efecto contorno).

CREAMY WHITE

Usado para expresar un color denso, lechoso. Y también para ser mezclado y usado en combinación con otros colores.

LT NATURAL GREY

Se utiliza para incrementar translucidez en las áreas iniciales y proximales para dientes ancianos.

LT YELLOW

Para reproducir un halo en los mamelones y para dar profundidad en las superficies oclusales.

● CUANDO NO SE DEBE USAR LA PORCELA LUSTER

1. Cuando la distancia entre la punta de la estructura del metal y el corte incisal es muy corta.
2. Cuando la porcelana no cubre completamente la superficie oclusal del diente molar.
3. Cuando el espesor de la porcelana es extremadamente delgado y además el punto de reflexión del opaquer es alto.

Para los casos indicados arriba es necesario usar solamente esmalte y la porcelana transparente. Así reproduciremos un aspecto más natural.